

OTICON | **ConnectLine**
Phone Adapter 2.0



Gebruiksaanwijzing

oticon
PEOPLE FIRST


Inhoudsopgave

Gebruik van ConnectLine Phone 2.0	4
Streamer Pro versus Streamer 1.4	5
Inkomende gesprekken	6
Uitgaand gesprek	10
De Phone Adapter schoonmaken	13
Extra informatie	14
Internationale garantie	17

Gebruik van ConnectLine Phone 2.0


De oplossing voor de vaste telefoon ondersteunt zowel inkomende als uitgaande telefoongesprekken. Tijdens een telefoongesprek worden de hoortoestellen als headset gebruikt en zorgt de aan een nekbus gedragen Streamer voor handsfree gebruik.

Dit deel van de gids is de "Gebruiksaanwijzing" en het legt uit hoe de Streamer wordt gebruikt voor telefoongesprekken. Start door ervoor te zorgen dat de Phone Adapter correct is geïnstalleerd, zoals omschreven in de "Installatiegids".

Voordat ConnectLine Phone 2.0 kan worden gebruikt, moeten Streamer en ConnectLine Phone 2.0 draadloos met elkaar worden verbonden. Deze verbinding wordt automatisch tot stand gebracht nadat Streamer en ConnectLine Phone 2.0 zijn gekoppeld en binnen elkaars bereik zijn (zie Bereik, bladzijde 13). ConnectLine Phone 2.0 is met Streamer verbonden als de stroomindicatie  op ConnectLine Phone 2.0 continu blauw blijft branden.

Streamer Pro versus Streamer 1.4

Onderstaande tekeningen laten de voornaamste verschillen tussen Streamer 1.4 en de meest recente Streamer Pro zien. Ga voor meer informatie naar: www.oticon.nl/connectline

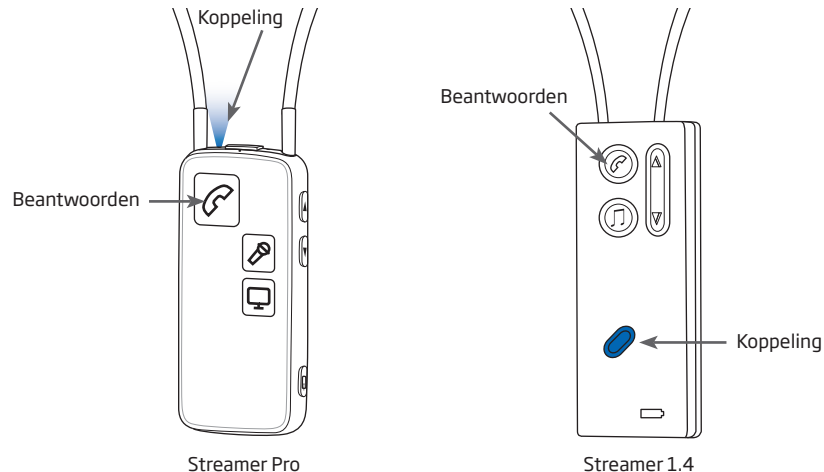

Inkomende gesprekken


Een gesprek aannemen en beëindigen







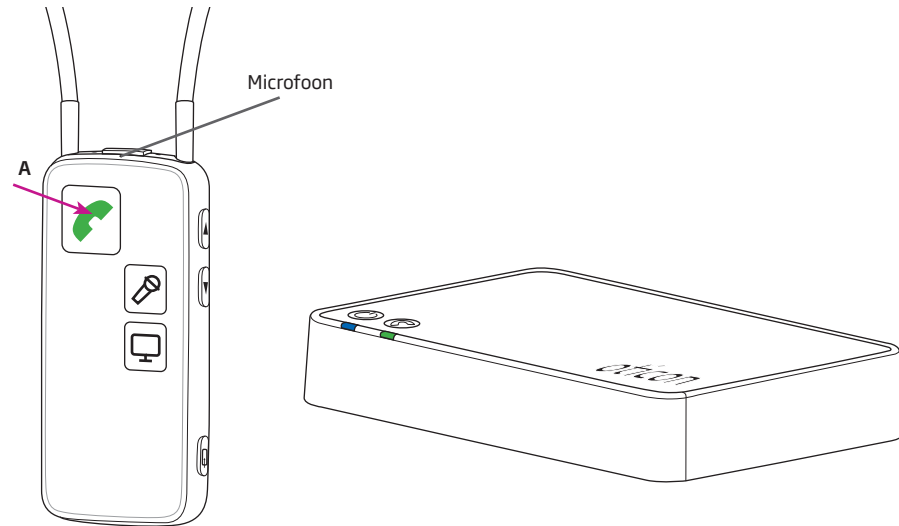

Zorg dat u goed in de microfoon van Streamer kunt praten.

Als de telefoon gaat, hoort u een waarschuwing voor een inkomend gesprek in uw hoortoestellen. De telefoonindicatie op ConnectLine Phone 2.0 knippert groen en tegelijk-ertijd knipperen de telefoontoets en statusindicatie van Streamer groen.

Druk de telefoontoets op Streamer kort in (A) om het gesprek aan te nemen. U hoort een korte bevestigingspiep in uw hoortoestellen. De telefoontoets en statusindicatie op Streamer en de telefoonindicatie op ConnectLine Phone 2.0 blijven continu groen branden.

Om het gesprek te beëindigen drukt u de telefoontoets op Streamer kort in; de groene telefoontoets op Streamer gaat vervolgens uit.



Een gesprek ontvangen			
Streamer Pro bovenkant	Streamer Pro voorkant	ConnectLine Phone 2.0	Beschrijving
			Streamer en ConnectLine Phone 2.0 zijn verbonden
			De telefoon gaat: de telefoonindicatie van ConnectLine Phone 2.0 en de statusindicatie en de telefoontoets op Streamer Pro knipperen groen. U hoort een waarschuwingssignaal voor een inkomend gesprek in uw hoortoestellen.
			Als u de telefoon opneemt, hoort u een bevestigingspiep . U kunt nu telefoneren.

 Continu  Knipperen

Uitgaand gesprek

Iemand bellen


Zorg dat u goed in de microfoon van Streamer kunt praten.

1. **Druk de telefoontoets van Streamer kort in (A)** om iemand op te bellen. U hoort een kiestoon in de hoortoestellen. De telefoontoets op Streamer en de telefoonindicatie op ConnectLine Phone 2.0 gaan continu groen branden.
2. **Neem de hoorn** van het toestel (of druk op 'bellen' bij een draagbare telefoon) en **toets het telefoonnummer in (B)** zoals u gewend bent.
3. Na korte tijd hoort u de oproeptoon in uw hoortoestellen om aan te geven dat het telefoongesprek nu is verbonden via uw Streamer en hoortoestellen.

U kunt **de hoorn weer op de telefoon leggen** (of 'einde gesprek' indrukken op de draagbare telefoon).

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u de telefoontoets op Streamer kort in.

* Opmerking: controleer na het gesprek dat de hoorn weer goed op de haak ligt, of de draagbare telefoon weer uit staat, om te voorkomen dat de telefoonlijn voor inkomende gesprekken geblokkeerd wordt.

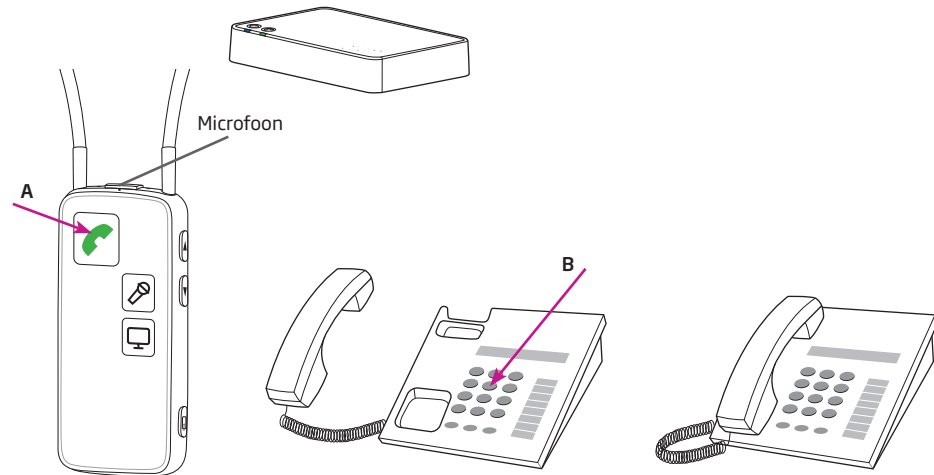

Iemand opbellen			
Streamer Pro bovenkant	Streamer Pro voorkant	ConnectLine Phone 2.0	Beschrijving
			Streamer en ConnectLine Phone 2.0 zijn verbonden
			Druk de telefoontoets van Streamer kort in. U hoort nu een kiestoon in de hoortoestellen

Continu Knipperen

De Phone Adapter schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de Phone Adapter.

BELANGRIJK

De Phone Adapter mag nooit gewassen of ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Extra informatie

Uitzetten van ConnectLine Phone 2.0

Als u geen telefoongesprekken via Streamer wilt ontvangen, kunt u ConnectLine Phone 2.0 uitzetten door de netadaptor uit het stopcontact te halen. ConnectLine Phone 2.0 verbruikt bij normaal gebruik zeer weinig stroom, dus het is niet nodig om het apparaat uit te zetten.

Bereik

Afhankelijk van de meubilering en muren heeft ConnectLine Phone 2.0 een bereik van maximaal 30 meter (naar Streamer Pro). Binnen dit bereik kunt u handsfree telefoneren met een goede geluidskwaliteit (zonder 'gekraak').

Normaal gesproken hoort u het waarschuwingssignaal voor een inkomend gesprek in de hoortoestellen tot een afstand van 30-40 meter. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u in de tuin werkt. U moet vervolgens wel dichterbij ConnectLine Phone 2.0 toe lopen om de stem van de persoon aan de andere kant van de telefoon goed te kunnen horen.

Volumeregelaar

Gebruik de volumetoets op Streamer om het volumeniveau van de telefoon in de hoortoestellen te regelen. Stel het volume bij door 'Hoger' of 'Lager' kort in te drukken. Herhaal het kort indrukken voor verdere bijstelling.

Het telefoonvolume dat door Streamer is ingesteld, wordt in het geheugen opgeslagen. Bij een volgend telefoongesprek wordt het laatst gebruikte volumeniveau toegepast.

Alleen geluid van het telefoongesprek

Als u voor de eerste keer een telefoongesprek voert, staan de hoortoestelmicrofoons standaard aan.

De hoortoestelmicrofoons kunnen worden gedempt, zodat u alleen het telefoongesprek hoort. Druk volume 'Hoger' EN 'Lager' tegelijkertijd 1 seconde in (Streamer Pro) of druk volume 'Hoger' OF 'Lager' 2 seconden in (Streamer).

De hoortoestelmicrofoons worden tijdens het gesprek weer geactiveerd als u de volumetoets 2 seconden indrukt (Streamer) of volume 'Hoger' EN 'Lager' tegelijkertijd kort indrukt (Streamer Pro).

Raadpleeg voor gedetailleerde gebruikersinstructies voor Streamer de Streamer Gebruiksaanwijzing.

Ga voor meer informatie over ConnectLine naar www.oticon.nl/connectline

BELANGRIJK

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel voor meer informatie over de functionaliteit van uw specifieke hoortoesteloplossing.

Internationale garantie

Uw Phone Adapter 2.0 valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden vanaf de leveringsdatum. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig hebt

Neem uw phone adapter mee naar uw hoorzorg professional. Kleine problemen of aanpassingen kunnen daar mogelijk ter plekke worden bekeken.

Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio-, of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact in een ander stroomcircuit dan datgene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de audicien of een ervaren radio-/tv-technicus.

IC verklaring

Gebruik valt onder de volgende voorwaarden:

- 1) Dit toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur.
- 2) Dit toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Verklaring IC stralingsblootstelling: Dit apparaat voldoet aan de IC-stralingsgrenzen voor een ongecontroleerde omgeving. De client moet de specifieke gebruiksaanwijzing volgen om te voldoen aan de regels van RF blootstelling. Deze zender mag niet worden gebruikt of geplaatst in combinatie met een andere antenne of zender.

24

Oticon A/S verklaart hierbij dat Connectline Phone 2.0 (BS-H200) voldoet aan de essentiële richtlijnen en relevante voorwaarden van Richtlijn 2014/53/EU. Conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd bij:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global



Afval van elektronische
apparatuur moet worden
verwerkt volgens
plaatselijke richtlijnen.



25



Technische informatie

ConnectLine Phone 2.0 bevat een draadloze zender die 2,4 GHz technologie bevat. Het emissievermogen van de ConnectLine Phone 2.0 is max. 10 dBm EIRP.

ConnectLine Phone 2.0 voldoet aan de internationale normen betreffende radio zenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op de ConnectLine Phone 2.0 zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

USA en Canada

Dit apparaat bevat een radiomodule met de volgende certificatie ID nummers:

FCC ID: UXZBSH200

IC: 8191A-BSSH200

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese industrie.

22

De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur.
2. Dit toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.













Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om deze apparatuur te gebruiken. Om te voldoen aan de regels betreffende de blootstellingseisen van FCC RF moeten dit apparaat en de antenne van dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd, dat er tenminste een afstand van 20 cm of meer is tussen het apparaat en een persoon. Andere gebruiksveranderingen moeten worden vermeden.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn ingesteld om bescherming te bieden tegen storing in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal

optreden in een bepaalde installatie.

23

Koppeling			
Streamer Pro bovenkant	Streamer Pro voorkant	ConnectLine Phone 2.0	Omschrijving
 		 	Streamer en ConnectLine Phone 2.0 staan aan (1)
 		 	Streamer staat in koppelingsstand (2)
 		 	Koppeling is voltooid (4)

 Continu  knippen

Koppeling van Streamer en Connectline Phone 2.0

Voordat u Streamer met Connectline Phone 2.0 kunt gebruiken, moeten de twee apparaten worden gekoppeld.

Koppelingprocedure:


1. Controleer of Connectline Phone aan staat; het indicatielampje moet continu groen branden.

2. **Houd de aan/uit toets op Streamer Pro (A) of de koppelingstoets op Streamer (B) 5-6 seconden ingedrukt**, totdat het blauwe lampje gaat knipperen.


3. Plaats Streamer op Connectline Phone 2.0 - de koppeling duurt ongeveer 20-60 seconden

4. Als de stroomindicatie op Connectline Phone 2.0 en de aan/uit toets op Streamer Pro of de koppelingstoets op Streamer continu blauw blijven branden, is de koppeling voltooid. De koppeling is eenmalig en hoeft niet meer te worden herhaald.


18

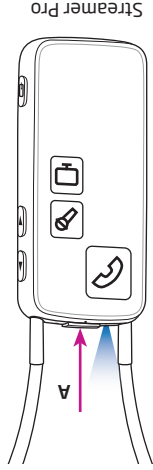

Streamer Pro

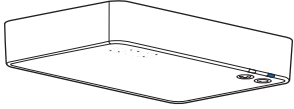

19

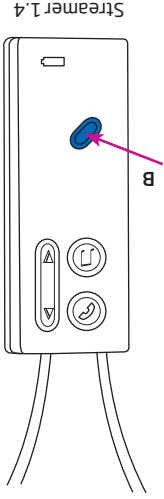

Streamer 1.4

Installatie van ConnectLine Phone 2 op de vaste telefoonlijn

Zet ConnectLine Phone 2.0 naast de telefoon of het basisstation.

1. Maak de telefoonlijn los van de telefoon (of het basisstation).*

2. Bevestig de telefoonlijn in het 'IN' contact van ConnectLine Phone 2.0.



3. Bevestig het telefoonsnoer van box 2 in het 'OUT' contact van ConnectLine Phone 2.0.

4. Bevestig de andere kant van het telefoonsnoer in de telefoon (of het basisstation).*

Als u de hoorn opneemt, hoort u een kiestoon.

16

* Wanneer de plug van uw telefoon of basisstation niet kan worden losgemaakt, moet u een andere telefoon gebruiken of een technicus vragen om uw ConnectLine Phone 2.0 te installeren.

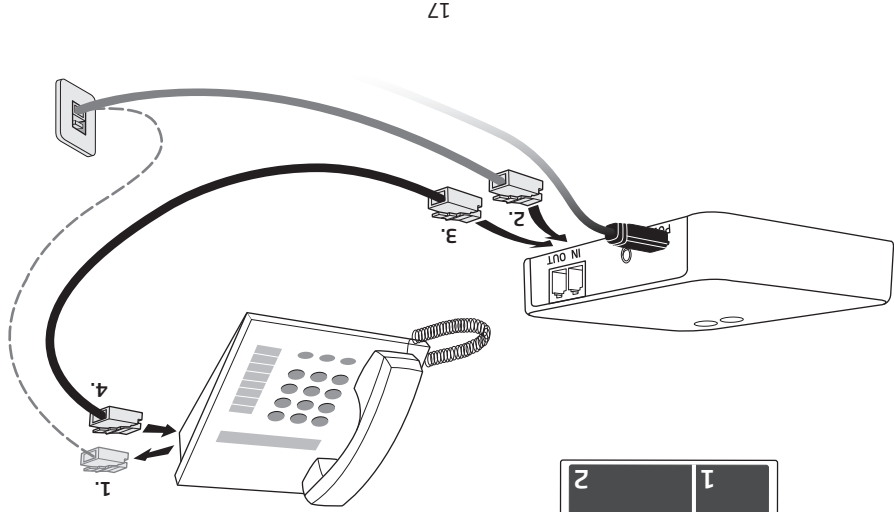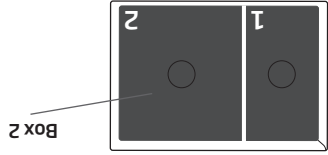


ConnectLine Phone 2.0 aansluiten op het lichtnet

Gebruik hiervoor de netadaptor met de USB kabel uit box 1


1. Steek de USB-stekker in de aansluiting voor de netadaptor van ConnectLine Phone 2.0

2. Steek de netadaptor in een stopcontact

3. Controleer of het apparaat van stroom wordt voorzien

4. Na een paar seconden zal de power indicator  op de voorkant van de Phone groen oplichten.

14

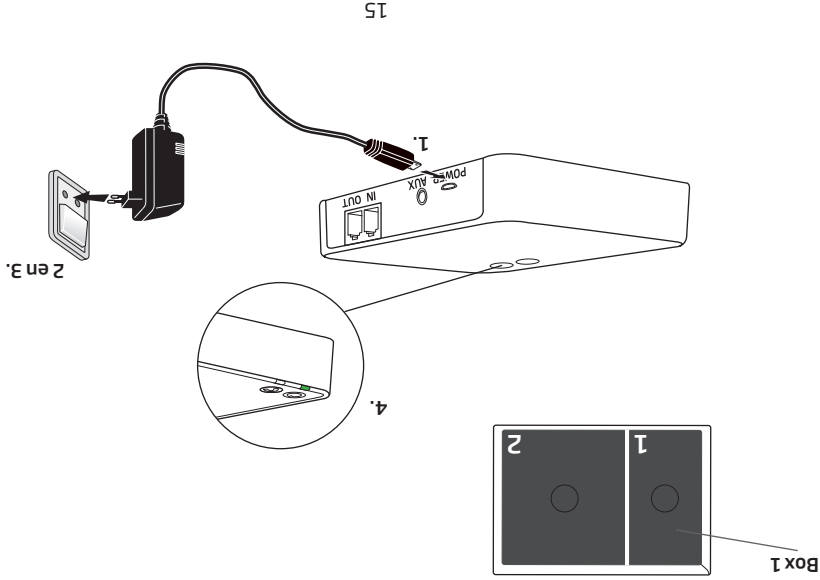

Installatie

Eerste gebruik van ConnectLine Phone 2.0

Voor dat u ConnectLine Phone 2.0 met uw hoorooplossing kunt gebruiken, moet hij aange-sloten worden op het lichtnet en verbonden worden met de vaste telefoonlijn.

Deze gids begeleidt u stap-voor-stap bij de installatie van ConnectLine Phone 2.0.

De verpakking bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de installatie.

Lees voor gebruik van ConnectLine Phone 2.0 de volgende waarschuwingen en de inhoud van dit boekje zorgvuldig door.

ConnectLine Phone 2.0 aangesloten op externe apparatuur

- De veiligheid van het gebruik van ConnectLine Phone 2.0 met de AUX-inputkabel is afhankelijk van de externe geluidsbron. Wanneer de inputkabel is aangesloten op apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60601, IEC-60950 of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.

- Hoewel ConnectLine Phone 2.0 voldoet aan de strengste eisen van de International Electromagnetic Compatibility kan hij storing veroorzaken bij medische apparatuur. Vraag daarom altijd na of ConnectLine Phone 2.0 in bijvoorbeeld een ziekenhuis mag worden gebruikt.

Explosieven

- De voeding in uw ConnectLine Phone 2.0 heeft onvoldoende energie om onder normale omstandigheden brand te veroorzaken. Phone Adapter 2.0 is niet getest op

10


nalering van de internationale eisen met betrekking tot explosieve omgevingen. We raden aan dat u uw ConnectLine Phone 2.0 niet gebruikt op plaatsen waar gevaar op explosie bestaat.

- ConnectLine Phone 2.0 is geen speelgoed en moet daarom buiten bereik worden gehouden van kinderen en ieder ander die onderdelen zou kunnen inslikken of zichzelf op een andere manier zou kunnen verwonden. Er moet speciaal worden gelet op de kleinere onderdelen om te voorkomen dat kinderen deze inslikken en erin stikken.
- Waarschuww onmiddellijk een arts als een onderdeel is ingeslikt.*

- Oticon ConnectLine Phone 2.0 is bedoeld voor thuisgebruik met een analoge telefoonlijn. Het is niet bedoeld voor digitale telefoonlijnen die onderdeel kunnen zijn van een digitaal/commercieel systeem. Onjuist gebruik met een digitaal telefoonstelsysteem kunnen resulteren in een verminderde functionaliiteit of storing van ConnectLine Phone 2.0 en hiermee vervalt de garantie. Als u niet zeker weet welk type telefoonstelsysteem u thuis of op het werk heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw lokale telefoonmaatschappij voordat u ConnectLine Phone 2.0 gaat installeren.

11

Afbeelding ConnectLine Phone 2.0

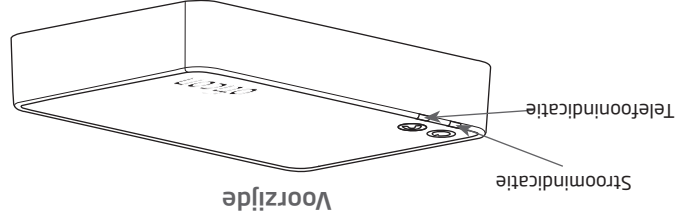


8

○ Geen lampje ● Knipperen ● Continu

Betekenis	Stroomindicatie	Telefoonindicatie
ConnectLine Phone 2.0 staat aan, geen verbinding met Streamer	● (Groen)	● (Rood)
Koppeling met Streamer aan het maken	● (Blauw)	● (Rood)
Draadloze verbinding met Streamer	● (Blauw)	● (Rood)
Inkomend gesprek	● (Blauw)	● (Rood)
Telefoongesprek	● (Blauw)	● (Rood)
Foutmelding (neem contact op met uw hoorzorg professional)	● (Rood)	● (Rood)

Achterzijde

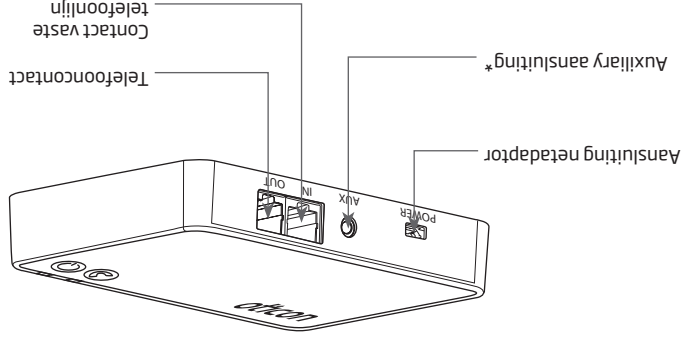

9

* Ga voor meer informatie naar: www.oticon.nl/connectline

Inhoud van de verpakking

ConnectLine Phone 2.0 - inhoud van de box
ConnectLine Phone 2.0 box bevat de volgende onderdelen:



Phone Adapter 2.0



Netadapter

(De stroomvoorziening kan per land verschillen)



Telefoon snoer



Deze handleidingen (Installatiegids en Gebruiksaanwijzing)

Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	7
Afbeelding van ConnectLine Phone 2.0	8
Waarschuwingen	10
Installatie	13
ConnectLine Phone 2.0 aansluiten op het lichtnet	14
Installatie van ConnectLine Phone 2.0 op de vaste telefoonlijn	16
Koppeling van Streamer en ConnectLine Phone 2.0	18
Technische informatie	22

BELANGRIJK

Lees de inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u ConnectLine Phone 2.0 gaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies en informatie over het gebruik van ConnectLine Phone 2.0.

Dank u

dat uw voor de Oticon ConnectLine Phone 2.0 heeft gekozen.

Wij hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat uw nieuwe ConnectLine Phone 2.0 voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en eenvoudig in het gebruik is.

De ConnectLine vaste telefoon oplossing (phone adapter) stelt u in staat om handsfree telefoongesprekken te voeren in de meeste ruimten in uw woning.


U kunt de volledige beschrijving van het ConnectLine-systeem vinden op www.oticon.nl/connectline. Hier staan ook interactieve presentaties, video's over het gebruik en een gedeelte met antwoorden op veelgestelde vragen.

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u ConnectLine Phone 2.0 gaat gebruiken. Neem voor eventuele verdere vragen over het gebruik of onderhoud van ConnectLine Phone 2.0 contact op met uw audicien.

Beoogd gebruik

Phone Adapter 2.0 is bedoeld voor gebruik met Oticon Streamer of Oticon Streamer Pro en draadloze hooroplossingen van Oticon.

Dit stelt de hoortoestelgebruiker in staat om draadloos te communiceren met een gesprekspartner via een vaste lijn (analoog/PSTN).

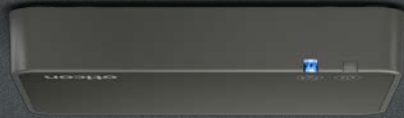

OTICON | **Connectline**
Phone Adapter 2.0

